


# FICHA TÉCNICA

**LÍNEA** Podología – Soporte para el pie en gel  
**NOMBRE** Almohadilla para talón – Punto azul  
**REFERENCIA** GL004  
**MARCA** 



**MATERIALES** Silicona 100% grado médico  
**TALLA** S | M | L | XL  
**UNIDAD** Par  
**COLOR** Blanco & Punto azul  
**EMPAQUE** Bolsa vinilo  
**ETIQUETA** Si  
**ESTERIL** No  
**VIDA ÚTIL** N/A  
**CLASE** I  
**INVIMA** 2018DM-0018806 – Vence 15 | 11 | 2028  
**Nº DE LOTE** SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS POR TALLA			PESO TOTAL	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA		
	LONGITUD	ANCHO	TALLA		CALZADO	TIPO DE CALZADO	
 0040 008	5,00 CM	8,00 CM	0,050 KI	S	33 - 35		
 0041 007	5,50 CM	9,50 CM	0,056 KI	M	36 - 38		
 0042 006	7,00 CM	10,00 CM	0,060 KI	L	39 - 41		
 0043 005	7,50 CM	11,50 CM	0,062 KI	XL	42 - 43		

**BODEGAJE** Conserve protegidas de la luz solar directa y de la humedad  
**TEMPERATURA** Ideal < 5° C y 30° C en condiciones secas | Humedad relativa ideal ≤70%  
**GARANTÍA** Treinta (30) días por defecto de fábrica  
**REQUISITO** Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado  
**EXCEPCIÓN** MAL USO | ABUSO

- Usar el producto sin calcetines genera humedad que conlleva a pequeñas perforaciones en el material
- Usar un tamaño que no encaje al calzado puede formar quiebres irreversibles

## CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Elija el calzado y el ancho de la almohadilla que mejor se adapte a la forma tus zapatos
- Lave con agua tibia y use detergente suave
- Controle la humedad del pie aplicando spray o polvos clásicos para pies, antes del uso
- Seque a la sombra

**RECOMENDACIONES:** Si las almohadillas son para uso diferente al espolón calcáneo, sobre peso o jornadas de pie (Ej. Lesión del tendón de Aquiles o gemelos, bursitis en talón, diabetes), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

**ADVERTENCIA:** Si por causa al uso de este tipo de almohadillas existiera un aumento en dolor o molestias, no solo en pies sino en espalda, consulte con el profesional de la salud

**CONTRA-INDICACIÓN:** Ninguna conocida

**País de origen:** China (ISO 1348)

**Importador titular y Acondicionador** **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia