

FICHA TÉCNICA



LINEA Miembro superior rígido
NOMBRE Férula mallet con correa
REFERENCIA FG-006-B
MARCA 

MATERIALES Polipropileno moldeado y perforado, cinta de velcro

TALLA # 1 - # 2 - # 3 - # 4 - # 5

UNIDAD Uno y Set por 6 Uds.

COLOR beige

EMPAQUE Bolsa plástica con cierre

ETIQUETA No

STICKER Si

ESTERIL No

VIDA ÚTIL N/A

CLASE I

INVIMA 2018DM-0018804 – Vence 05 | 11 | 2028

Nº DE LOTE SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS PARA ELECCIÓN DE TALLA				PESO / UNIDAD
	TALLA	LONGITUD	DIAMETRO	GRÁFICO	
0061 0001	# 1	5,0 CM	6,0 CM		0,003 KI
0062 0000	# 2	5,5 CM	6,2 CM		0,004 KI
0063 0009	# 3	5,7 CM	6,3 CM		0,004 KI
0064 0008	# 4	5,9 CM	7,3 CM		0,004 KI
0065 0007	# 5	6,1 CM	8,3 CM		0,005 KI

BODEGAJE Sin requisitos esenciales

TEMPERATURA Ideal < 35º C - en condiciones secas | Humedad relativa: sin restricciones

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y sticker en buen estado

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

Exceder la expansión en la abertura central genera rompimiento


ORIENTACIÓN PARA ELECCIÓN DE LA TALLA Y CARACTERÍSTICAS INTRÍNSICAS

A. Elija el # y pruebe el tamaño en la falange de la mano contraria. Posicione la férula en el dedo lesionado, si está inflamado, la abertura central se ajustará gradualmente durante el proceso desinflamatorio

B. Ventana para control visual de posibles cambios en el proceso de curación

C. Orificios que garantizan aireación.

D. Correa con ajuste que brindan ahorro en la compra de cintas adhesivas para su fijación

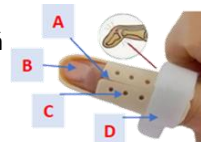

RECOMENDACIÓN: Uso para protección y proceso curativo en la falange distal

ADVERTENCIA: Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: China (ISO13485)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia