

# FICHA TÉCNICA



**LINEA** Miembro superior rígido

**NOMBRE** Férula para muñeca - Túnel Carpiano

**REFERENCIA** WT-037

**MARCA** 

**MATERIALES** Poliéster acolchado leve y perforado, elástico, férula en aluminio, velcro

**TALLA** Universal

**UNIDAD** Uno

**COLOR** Negro

**EMPAQUE** Bolsa vinilo con gancho

**ETIQUETA** Si

**ESTERIL** No

**VIDA ÚTIL** N/A

**CLASE** I

**INVIMA** 2018DM-0018804 – Vence 05 | 11 | 2028

**Nº DE LOTE** SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS DEL PRODUCTO		PESO TOTAL	GUÍA TALLA DE LA MUÑECA	
	LONGITUD	ANCHO		MÍNIMO	MÁXIMO
0370 0006	20,5 CM	13,0 CM	0,085 KI	$\varnothing \leq 15$ CM	$\varnothing \leq 29$ CM



**BODEGAJE** Sin requisitos esenciales

**TEMPERATURA** Ideal < 35° C - en condiciones secas. Humedad relativa ideal < 65 %

**GARANTÍA** Treinta (30) días por defecto de fábrica

**REQUISITO** Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado




**EXCEPCIÓN** MAL USO | ABUSO

Redoblar el aluminio de la férula genera cambios en su estructura y debilita el material

## CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Lavar a mano con jabón neutro
- No torcionar la prenda al escurrirla, prefiera una toalla seca para absorber la máxima humedad posible
- Seque a la sombra. No utilizar máquina ni plancha para el secado

## CONSEJO PRÁCTICO AL MOMENTO DE LA LIMPIEZA O LAVADO

- Retire la férula insertada en la palma de la muñequera 
- Conserve la posición de la férula al retirarla de la muñequera 
- Después del lavado inserte de nuevo la férula, ingresando la curva abductora por la palma de la muñequera 

**RECOMENDACIÓN:** Apto para personas con reacción alérgica al material del neopreno

**ADVERTENCIA:** En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

**CONTRA-INDICACIÓN:** Ninguna conocida

**País de origen:** China (ISO13485)

**Importador titular y Acondicionador** **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia