

FICHA TÉCNICA



LINEA Miembro inferior rígido
NOMBRE Férula O.T.P (Pie caído)
REFERENCIA FT055
MARCA

MATERIALES Polipropileno preformado a 90º, dos (2) bandas anchas en tela suave, velcro

TALLA S/M – L/XL

UNIDAD Uno

COLOR Blanco

EMPAQUE Bolsa plástica

ETIQUETA Si

ESTERIL No

VIDA ÚTIL N/A

CLASE I

INVIMA 2018DM-0018804 – Vence 05 | 11 | 2028

Nº DE LOTE SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS DEL PRODUCTO			PESO TOTAL	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA			
	ALTURA	LONG.SUELA	ANC.SUELA		TALLA	PÍE	LONG. PÍE	CALZADO
S/M IZQ 0553 0007	26.5 CM	24,00 CM	6,50 CM	0,197 KI	S/M	IZQUIERDO	22-24 CM	34-38
L/XL IZQ 0554 0006	26.5 CM	30,00 CM	6,50 CM	0,225 KI	L/XL	IZQUIERDO	28-31 CM	39-43
S/M DER 0551 0009	26.5 CM	24,00 CM	6,50 CM	0,197 KI	S/M	DERECHO	22-24 CM	34-38
L/XL DER 0552 0008	26.5 CM	30,00 CM	6,50 CM	0,225 KI	L/XL	DERECHO	28-31 CM	39-43

BODEGAJE Sin requisitos esenciales

TEMPERATURA < 20° C a > 60° C. Humedad relativa: sin restricciones

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

- Usar el producto sin calcetines genera humedad que conlleva a pequeñas perforaciones en el material
- Usar un tamaño que no encaje al calzado representa una amenaza de fractura de la férula

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Utilizar calzado suficientemente grande y diseño con cordón para facilitar la acomodación del pie y la ortesis dentro del calzado y evitar así, posible fractura de la férula por stress
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado para actividades asociadas con un riesgo de impacto significativo
- Use detergente suave para su limpieza. No utilice alcohol ni detergente lava loza
- Secar las bandas a la sombra y zona aireada

RECOMENDACIONES: Utilice la banda para estabilizar el pie cuando se use sin calzado

ADVERTENCIA: Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico

CONTRA-INDICACIÓN: No hay una contraindicación absoluta, pero sí es necesario evaluar y tomar algunas precauciones

País de origen: China (ISO 13485)

Importador titular y Acondicionador ORTOTEX S.A.S | Medellín | Antioquia | Colombia