

FICHA TÉCNICA



LINEA Cintas médicas adhesivas
NOMBRE Cinta Poliuretano transparente
REFERENCIA FIXPU5050 | FIXPU5010 | FIXPU1050 | FIXPU1010 | FIXPU1510
MARCA Pharmafix PU ®

MATERIALES Lámina médica de poliuretano (PU) transparente
Área adhesiva recubierta en papel siliconado
Adhesivo acrílico hipo alergénico

UNIDAD Rollo

COLOR Transparente

EMPAQUE Rollo/Caja

ETIQUETA Si

ESTERIL No

VIDA ÚTIL 5 años

N° DE LOTE Si

CLASE I

INVIMA 202ODM-0021453

VENCE 19|03|2030

Referencia	Dimension Total		Presentación		Peso/ Rollo
	cm Ancho	mts Long	Rollos Caja	Cajas/ Caja	
FIXPU5050	5cm	5 mt	1	72	Apróx. 0,072 KI
FIXPU5010	5cm	10 mt	1	72	Apróx. 0,117 KI
FIXPU1050	10cm	5 mt	1	36	Apróx. 0,130 KI
FIXPU1010	10cm	10 mt	1	36	Apróx. 0,234 KI
FIXPU1510	15cm	10 mt	1	36	Apróx. 0,325 KI

PASOS PARA APLICARLO

Antes de aplicarlo, limpie la zona a tratar con alcohol o jabón antiséptico y espere 3 a 5 minutos que la piel seque. Aplicar por el cuidador con las manos limpias y secas

Separe con una leve tracción la cubierta protectora (PEEL) para facilitar el retiro al finalizar todos los pasos

Tome el borde del papel blanco lateral inferior y separe una parte (verifique que la cinta adhesiva transparente esté adherida al papel siliconado superior (PEEL)

Posicione la cinta adhesiva que está libre del papel blanco en el área a proteger

Retire de forma gradual el resto del papel blanco al tiempo que fija la cinta transparente con una suave presión sobre el papel PEEL

Posicionada la cinta adhesiva en el área a proteger retire el papel superior PEEL
¡Ya tienes la piel protegida!



BODEGAJE Conserve en lugar fresco, libre de humedad excesiva y alejado de la luz

TEMPERATURA Ideal $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | Humedad relativa ideal: $\leq 75^{\circ}\text{F}$

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

Será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentra por fuera de las especificaciones técnicas

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

REQUISITO Presentar factura del comprador.

El producto debe conservar su empaque original y el sticker del importador

ADVERTENCIA:

- No colocar directamente sobre la herida
- No usar si conoce alergias a sus componentes
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: Egipto (ISO 13485)

Importador titular y Acondicionador ORTOTEX S.A.S | Medellín | Antioquia | Colombia