

FICHA TÉCNICA

LINEA Cintas médicas adhesivas
NOMBRE Cinta Poliéster Stress
REFERENCIA FIX5050 | FIX5010 | FIX1050 | FIX1010 | FIX1510
MARCA Pharmafix®



MATERIALES Cinta médica de tela en poliéster no tejida
Área adhesiva recubierta en papel siliconado
Adhesivo acrílico hipo alergénico

UNIDAD Rollo

COLOR Blanco

EMPAQUE Rollo/Caja

ETIQUETA Si

ESTERIL No

VIDA ÚTIL 5 años

N° DE LOTE SI

CLASE I

INVIMA 202ODM-0021453

VENCE 19|03|2030

Referencia	Dimension Total		Presentación		Peso/ Rollo
	cm Ancho	mts Long	Rollos Caja	Cajas/ Caja	
FIX5050	5cm	5 mt	1	72	Apróx. 0,052 KI
FIX5010	5cm	10 mt	1	72	Apróx. 0,101 KI
FIX1050	10cm	5 mt	1	36	Apróx. 0,107 KI
FIX1010	10cm	10 mt	1	36	Apróx. 0,190 KI
FIX1510	15cm	10 mt	1	36	Apróx. 0,265 KI

PASOS PARA APLICARLO

Antes de la aplicación limpie la zona a tratar con alcohol o jabón antiséptico y espere 3 a 5 minutos que la piel seque. Aplicar por el cuidador con las manos limpias y secas

Corte la cantidad de cinta que requiere



Traccione con suavidad la línea en zig zag



Separe en su totalidad un ala del papel siliconado



Ya expuesta la cinta adhesiva, posicónela en el área a tratar



Desprenda el ala que aún conserva el papel y termine de posicionar la cinta



Presione con suavidad los bordes de la cinta para una fijación segura sobre la piel



BODEGAJE Conserve en lugar fresco, libre de humedad excesiva y alejado de la luz

TEMPERATURA Ideal $\leq 40^\circ\text{C}$ | Humedad relativa ideal: $\leq 75^\circ\text{F}$

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

Será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentra por fuera de las especificaciones técnicas

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

REQUISITO Presentar factura del comprador.

El producto debe conservar su empaque original y el sticker del importador

ADVERTENCIA:

- No colocar directamente sobre la herida
- No usar si conoce alergias a sus componentes
- No estire la cinta para posicionarla, este efecto genera ampollas e irritación en la piel por tensión

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: Egipto (ISO 13485)

Importador filular y Acondicionador ORTOTEX S.A.S | Medellín | Antioquia | Colombia