

# FICHA TÉCNICA



**LINEA** Miembro inferior blando  
**NOMBRE** Soporte para rodilla almohadilla en gel  
**REFERENCIA** KN-005  
**MARCA**

**MATERIALES** 4 tipos de tejido de punto elástico, 2 estancias laterales en acero flexible, almohadilla patelar en gel visco elástico, bordes en silicona

**TALLA** S - M - L - XL

**UNIDAD** Uno

**COLOR** Gris / azul

**EMPAQUE** Bolsa vinilo con gancho

**ETIQUETA** Si

**ESTERIL** No

**VIDA ÚTIL** N/A

**CLASE** I

**INVIMA** 2018DM-0018806 – Vence 15 | 11 | 2028

**Nº DE LOTE** SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS POR TALLA			PESO TOTAL	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA			Flexione la rodilla a 30°
	LONGITUD	ANCHO SUP	ANCHO INF		TALLA	MUSLO A	PANTORRILLA B	
(S) 0051 0004	30,00 CM	33,00 CM	28,00 CM	0,16 KI	S	Ø ≤ 43	Ø ≤ 34	
(M) 0052 0003	30,00 CM	35,00 CM	30,00 CM	0,17 KI	M	Ø ≤ 45	Ø ≤ 35	
(L) 0053 0002	30,00 CM	37,00 CM	32,00 CM	0,18 KI	L	Ø ≤ 48	Ø ≤ 37	
(XL) 0054 0001	30,00 CM	38,00 CM	33,00 CM	0,20 KI	XL	Ø ≤ 50	Ø ≤ 40	

**BODEGAJE** Mantener alejado de la luz solar y humedad excesiva

**TEMPERATURA** Ideal < 35° C - en condiciones secas | Humedad relativa ideal < 65 %

**GARANTÍA** Treinta (30) días por defecto de fábrica

**REQUISITO** Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN** MAL USO | ABUSO



Presionar con las uñas para ajustar la rodillera al muslo afecta la integridad del producto


Halar desde un punto diferente a sus ojales, afecta la integridad del elástico y la silicona interna del borde superior



## CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Es fundamental la elección correcta de la talla
- Lavar a mano con jabón neutro
- No torcionar la prenda al escurrirla, prefiera usar una toalla seca para eliminar el exceso de humedad
- Seque a la sombra. No utilice máquina ni plancha

### Modo correcto de colocar la rodillera

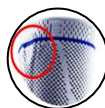

Hale la de los ojales laterales internos para deslizar la rodillera hasta posicionarla



**RECOMENDACIÓN:** Apto para personas con reacción alérgica al material del neopreno

**ADVERTENCIA:** En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

**CONTRA-INDICACIÓN:** Ninguna conocida

País de origen: China (ISO13485)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia