

# FICHA TÉCNICA



**LINEA** Miembro inferior blando  
**NOMBRE** Soporte para rodilla con estabilizadores laterales  
**REFERENCIA** KN-007  
**MARCA** 

**MATERIALES** Elástico, 2 estancias laterales flexibles en polipropileno, hilos elásticos

**TALLA** S - M - L - XL

**UNIDAD** Uno

**COLOR** Negro

**EMPAQUE** Bolsa vinilo con gancho

**ETIQUETA** Si

**ESTERIL** No

**VIDA ÚTIL** N/A

**CLASE** I

**INVIMA** 2018DM-0018806 – Vence 15 | 11 | 2028

**Nº DE LOTE** SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS POR TALLA			PESO TOTAL	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA			Flexione la rodilla a 30°
	LONGITUD	ANCHO SUP	ANCHO INF		TALLA	MUSLO A	PANTORRILLA B	
 7100 0008	29,00 CM	30,00 CM	26,00 CM	0,14 KI	S	∅ ≤ 38	∅ ≤ 32	
 7200 0007	29,00 CM	32,00 CM	28,00 CM	0,15 KI	M	∅ ≤ 40	∅ ≤ 34	
 7300 0006	29,00 CM	34,00 CM	30,00 CM	0,17 KI	L	∅ ≤ 44	∅ ≤ 36	
 7400 0005	29,00 CM	36,00 CM	35,00 CM	0,19 KI	XL	∅ ≤ 46	∅ ≤ 38	

**BODEGAJE** Mantener alejado de la luz solar y humedad excesiva

**TEMPERATURA** Ideal < 35° C - en condiciones secas | Humedad relativa ideal < 65 %

**GARANTÍA** Treinta (30) días por defecto de fábrica

**REQUISITO** Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN** MAL USO | ABUSO



Presionar con los dedos en el orificio de la patela para deslizar la rodillera, destruye la estructura de los hilos elástico en la circunferencia patelar

## CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Es fundamental la elección correcta de la talla
  - Lave a mano con jabón neutro
- rodillera:**
- No torcionar la prenda al escurrirla, prefiera usar una toalla seca para eliminar el exceso de agua
  - Seque a la sombra. No utilice maquina ni plancha

### Modo correcto de colocar la

Hale del extremo superior hasta ubicar la patela en el orificio central



**RECOMENDACIÓN:** Apto para personas con reacción alérgica al material del neopreno

**ADVERTENCIA:** En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

**CONTRA-INDICACIÓN:** Ninguna conocida

**País de origen:** China (ISO13485)

**Importador titular y Acondicionador** **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia